

NÁVOD NA SPRÁVNE OBLIEKANIE A OŠETRENIE KOMPRESÍVNYCH ZDRAVOTNÝCH VÝROBKOV MAXIS

Vážený odberateľ,

Dostali ste do rúk nový zdravotný kompresívny pančuchový výrobok. Dôsledné nosenie pomáha pri liečbe kŕčových žíl a obmedzuje vznik opuchov. Je nevyhnutné dbať pri jeho používaní na zvýšenú opatrnosť.

Do výrobku mechanicky nezasahujte! Prebytočné nite vo vnútri výrobku neodstrihávajte, zostávajú tam z technologických dôvodov.

• Postup pri obliekaní

Výrobok navliekajte vždy na suchú nohu, najlepšie hneď ráno pred zaťažením končatiny, a to v sede. Nikdy neobliekajte výrobok ťahom za horný okraj, navliekajte ho postupne, zabránite tak jeho poškodeniu. K výrobkom s otvorenou špičkou prikladáme pre ľahšie obliekanie hladký návlék, ktorý sa nasadí na prsty až po pätu. Pančuchu pretiahnite naruby po oblasť členku. Vsúňte palce dovnútra pančúch, mierne zhrňte kúsok pretiahnutej časti a natiahnite pančuchu cez prsty na priehlavok a postupne pretiahnite cez pätu. Päta je oblasť, kde je potrebné vyvinúť väčšiu silu pre pretiahnutie pančuchy. V oblasti členka je najvyšší kompresívny tlak, výrobok je tu najužší. Postupne pribierajte dlhšiu časť pančuchy a nakladajte ju smerom ku kolenu, prípadne vyššie, podľa typu pančuchy. Nakoniec hladením dlaňami vyrovnajte prípadné záhyby a nerovnosti v smeru od členkov vyššie, až pocítite priliehavý kompresívny účinok výrobku na celej ploche povrchu nohy. Nakoniec vytiahnite hladký návlék cez otvor na prstoch. Spočiatku Vám môže obliekanie pripadať náročné, avšak pri opakovanom používaní získate potrebnú zručnosť a navliekanie pre Vás bude ľahšie. Postup navliekania je obrázkovo znázornený v prednej časti návodu na použitie. Pre jednoduchšie navliekanie kompresívnych pančúch možno použiť i kovový navliekač, ktorý nájdete v našej ponuke.

• Zhotovenie na mieru

Pri neštandardných veľkostiach vyrábame výrobky vo vyhotovení „Micro“ podľa osobných dispozícií pacienta priamo na mieru.

• Dôležité rady

Pri navliekaní si zložte z rúk prstene, sú častou príčinou poškodenia výrobku. Dbajte taktiež na zvýšenú starostlivosť o svoje chodidlá, pretože drsný povrch nôh môže výrobok taktiež poškodiť. Nite, ktoré sú vo vnútri výrobku, neodstrihávajte, nakoľko tu zostávajú ponechané z technologických dôvodov a ich prítomnosť nie je poškodením. Nesnažte sa opravovať konštrukciu pančuchy sami - môže dôjsť k zhoršeniu kvality a účinku. K udržaniu životnosti výrobku je treba používať i vhodnú obuv, do uzavretej obuvi je výhodné nosiť cez kompresívne pančuchy jemnú bavlnenú ponožku. Sledujte hodnotu kompresívnej

triedy, ktorú pre Vašu liečbu určil lekár. Skontrolujte, či údaje o kompresívnej triede na etikete všitej vo výrobku súhlasia s údajmi na obale výrobku. Skladujte v suchom prostredí pri izbovej teplote a chráňte proti priamemu slnečnému žiareniu. Doba upotrebitelnosti 6 mesiacov sa vzťahuje len na stálosť kompresívneho tlaku pri bežnom používaní a pri dodržovaní zásad na ošetrovanie výrobku.

• Starostlivosť

Pri praní a ošetrovaní výrobku dodržujte doporučené symboly údržby. Pre čistenie výrobku nepoužívajte žiadne organické rozpúšťadlá (benzín apod.), preto ich chráňte pred kožnými olejmi a masťami, ktoré zanechávajú na lemoch tenký film a lepiacu schopnosť lemu sa veľmi znižuje. Lepiaca schopnosť opäť obnovíte, keď silikónové prúžky alebo body pretriete liehovým roztokom.

• Kontraindikácie

Dekompenzovaná srdečná insuficiencia, septická flebitída, flegmázia (zápal).

• Indikácie

Primárne a sekundárne kŕčové žily, tehotenské kŕčové žily, prevencia pred trombózou, tromboflebitída, všetky dôsledky chronickej žilovej nedostatočnosti, posttrombotický syndróm, opuchy v tehotenstve, posttrombotické a pooperačné opuchy, cyklické a idiopatické opuchy, lymfatické opuchy a opuchy pri nadváhe, po sklerotizácii a po chirurgickom žilovom zásahu, angiodisplázii, stav po zhojenej flebitíde, stav po tromboze.

• Materiálové zloženie

Uvedené na textilnej etikete pančuchy.

• Dôležité informácie pre užívateľov

Odporúčame, aby kompresívny výrobok používal iba jeden pacient. Ak bude výrobok používať pre liečbu viac než jeden pacient alebo budú na výrobku urobené neodborné zmeny, zaniká záruka na výrobok poskytovaná výrobcom v zmysle zákona o zdravotníckych výrobkoch. Vedľajšie účinky nie sú doposiaľ známe. Pokiaľ by ste počas nosenia pociťovali nadmerné bolesti alebo nepríjemný pocit, produkt ihneď vyzlečte a navštívte svojho lekára alebo špecializovanú predajňu, kde ste produkt zakúpili.


Pri akejkolvek zmene zdravotného stavu konzultujte vhodnosť používania tohto výrobku s ošetrujúcim lekárom. Ide predovšetkým o opuchy, zvýšené teploty apod.

a


1



2

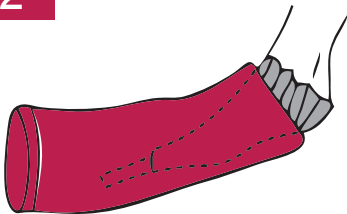

3

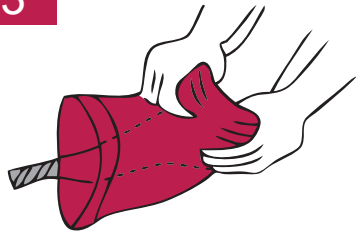

4



5



6



b

